



## Cluster headache (NRB)\* maska s vakem/ typ 8140

Prodejní cena 1 kus:

42,20 Kč bez DPH (tj. 51,10 Kč vč. 21% DPH)

### Použití:

Pacient si napojí volný konec spojovací hadice na výstup kyslíku na LIV<sup>®</sup> lahvi. Otočí a spustí hlavním uzávěrem nahoře na boku lahve přívod kyslíku (otočit směrem ke znaménku +), nastaví na regulátoru průtoku (horní otočný ovladač s číslicemi) lékařem naordinovaný průtok (7, 9, 12 nebo 15 l/min). Naplní plastový vak NRB masky, upevní si masku na obličej, pevně přitiskne, upevní kovové úchyty na kořeni nosu a zhluboka si dýchá 5 – 15 minut dle potřeby (za stále otevřeného přívodu kyslíku do vaku s maskou), do chvíle, kdy bolest ustoupí. Pokud je s pacientem v době záchvatu bolesti přítomna další osoba, tato zajistí, aby po použití byl uzavřen jako první hlavní uzávěr kyslíku, poté regulátor průtoku. Pokud je pacient sám a jeho stav po odeznění bolesti dovolí, uzavře stejným způsobem oba ovladače přívodu kyslíku.

Usne-li pacient dříve, než uzavře oba ovladače, je pravděpodobné, že mu kyslík z lahve vyprchá. Z bezpečnostních důvodů je nutné co nejdříve (okamžitě po procitnutí) kyslík z místnosti dobře vyvětrat.



\*NRB = Non-ReBreathable